



VENTRY — это высокоэффективная и удобная в использовании система для холодной стерилизации медицинских инструментов. Сочетая в себе скорость, безопасность и совместимость с различными материалами, она предлагает практичное решение для повседневных потребностей стерилизации в медицинских учреждениях.

Каталожный номер

[II-090-00] Коробка из 15 ампул



Быстрая
Полная стерилизация
за 60 секунд



Совместимость
Совместимо со
всеми материалами
и бережно
относится к
эндоскопам и
инструментам.



Практично и безопасно
Одноразовая упаковка.
Без запаха, не
вызывает
раздражения и не
выделяет вредных
паров.



Экологично
Упрощенная
очистка и
стерилизация.



Простота утилизации
Можно выливать
непосредственно в
канализацию. Не
требует
специального
обращения или
дополнительных
действий.

Порошок самопроизвольно растворяется в воде комнатной температуры в течение нескольких секунд после смешивания.

Продукт основан на ионах свободных радикалов, которые окисляются при контакте с кислородом. Поэтому пользователю не требуется индивидуальное защитное снаряжение во время подготовки и использования.

Инструменты необходимо промыть водой, а затем высушить ткань перед погружением в стерилизационный раствор. Все физиологические остатки от пациента должны быть удалены.

ОПИСАНИЕ

VENTRY — это порошок для холодной стерилизации. Он представляет собой новейшую инновацию в области стерилизационных процессов и позволяет проводить чрезвычайно быструю и эффективную обработку. Продукт безопасен для пользователя и сохраняет полную функциональность эндоскопов и инструментов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстрая стерилизация термочувствительных инструментов, металлических инструментов, волоконно-оптических инструментов и медицинских устройств.

СОСТАВ ПОРОШКА

Буферные окислители + активаторы

Они генерируют поток свободных радикалов, которые могут самоподдерживаться и усиливаться, предотвращая любую потерю активности в течение всего периода стабильности раствора.

АКТИВНЫЙ ПРИНЦИП И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Снижение активности свободных радикалов в водном растворе при базовом уровне pH.

Перенос электронов вызывает химические реакции, которые приводят к необратимому повреждению структуры патогенных микроорганизмов, что приводит к их немедленному уничтожению.

СПЕКТР ЭФФЕКТИВНОСТИ

Быстрое и надежное действие против:

- Грамположительных и грамотрицательных бактерий
 - Вирусами (включая ВИЧ, ВГВ, ВГС)
 - Микобактериям туберкулеза
 - Спорам
 - Грибками
 - Нетрадиционные патогены с белковой структурой
- За считанные секунды **VENTRY** может достичь 8-кратного снижения как вегетативных, так и споровых форм.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



- 1 Высыпьте содержимое одной ампулы (5 граммов порошка) в 2 литра воды. Достаточно использовать водопроводную воду комнатной температуры.



- 2 Перемешивайте в течение нескольких секунд, пока порошок полностью не растворится.



- 3 Подождите, пока раствор станет прозрачным и приобретет характерный светло-желтый цвет, что подтверждает начало действия.



- 4 Высушите инструмент или эндоскоп стерильной тканью, чтобы обеспечить стерильность при обращении.

УПАКОВКА

1 коробка: 15 ампул
(по 7 граммов порошка в каждой)

СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения порошка:
24 месяца

СРОК ХРАНЕНИЯ

48 часов – затем приготовьте новый раствор.